


Nyt insulin-nåleaftræk på USON låg

Låg med universalt nålehoved-aftræk til insulinpenne.
Til alle gængse diametre.

Låget til USON kanylebeholdere er blevet forbedret. Med det nye koniske hul til nåleaftræk på insulin penne kan låget anvendes til alle nåletyper uanset diameter/fabrikat.

Instruktion

Med det koniske aftrækshul er nålehovedets diameter underordnet. Alle gængse nåletyper passer til hullet, idet insulinpennen blot skal skubbes ind, til der opnås et fast greb om nålehovedet. Store nålediametre vil dermed blive fastholdt omkring hullets største åbning, medens mindre nåle fastholdes i den smallere ende.

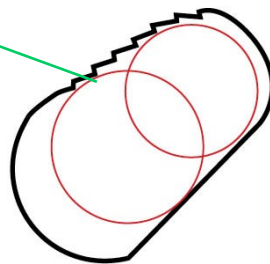

Ø: 10 - 12 mm

Sådan aftrækkes nålehovedet:



- 1 Indsæt nålehovedet ved hullets største åbning.
- 2 Forskyd pennen mod den smallere ende, indtil der mærkes et fast greb om nålen
- 3 Når nålehovedet er fastgjort i hullet, drejes insulinpennen, indtil skaftet er helt frit af nålehovedet.
- 4 Sidder nålehovedet fortsat fast i det koniske hul, vil et let skub med pennen presse nålen ned i beholderen.



Bemærk: Er kanylebeholderen fastspændt i den særlige borddisk, er det endnu lettere at foretage hele processen med én hånd.

ISO 9001 · ISO 13485
Management System Certification
BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S



USON PLAST A/S is certified by BVQI according to DS/EN ISO 9001 and 13485