



# VEJLEDNING

## i-Port Advance™

### PÅSÆTNING

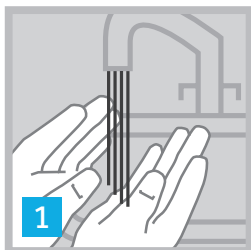


**1**  
Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe.

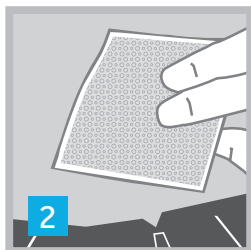


**2**  
Aftør huden med sprit eller et andet desinfektionsmiddel. Lad huden tørre før du påsætter i-Port.



**3**  
Træk i den røde strip og fjern forseglingen.

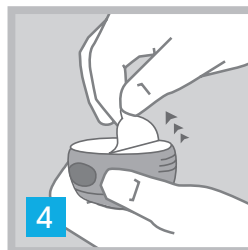

**4**  
Fjern det sterile papir.

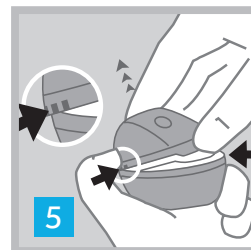


**5**  
Hold godt fast på serteren og fjern plastiklåget.




**6**  
Fjern dækpapiret fra plasteret.




**7**  
Drej på nålebeskytteren og fjern den fra indføringsnålen.

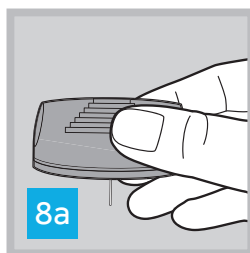


**8a**  
Vend i-Port så nålen vender nedad.

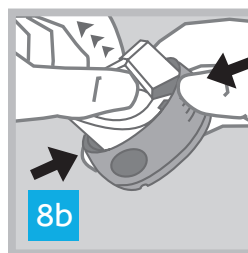


**8b**  
Grib om de rillede områder på siderne og træk derefter op indtil serteren bliver fastlåst i lodret stilling.

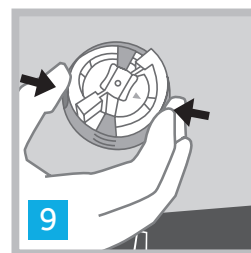


**9**  
Placer serteren på det afsprittede område. Sæt fingrene på hver side i de runde fordybninger. Tryk samtidig på de to runde fordybninger for at påsætte i-Port.

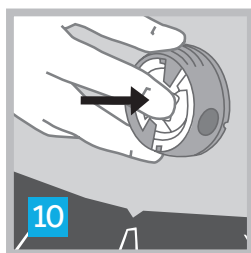

**10**  
Tryk ned på midten af serteren for at påsætte i-Port på huden.

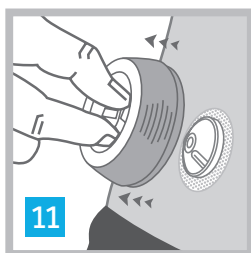

**11**  
Tag fat på midterdelen og træk forsigtig tilbage for at fjerne serteren fra i-Port.

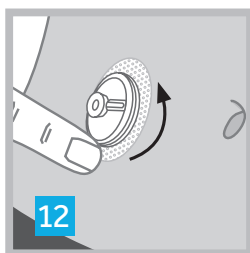

**12**  
Fastgør plasteret på huden.



**13**  
Sæt plastiklåget på igen og bortskaf affaldet efter givne anbefalinger.

### GODE RÅD


- Før du anvender i-Port Advance™, bør du identificere forskellen mellem de runde fordybninger og de rillede områder på siden af i-Port Advance™.
- Vær opmærksom på kun at tage fat på midterdelen af serteren, når du skal fjerne serteren fra i-Port Advance™. (se trin 11)

**Medtronic**  
Further. Together


# VEJLEDNING

## i-Port Advance™


### BRUG

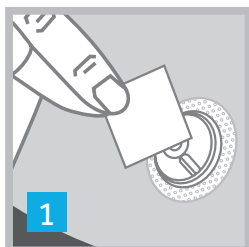


Rens membranen før hver anvendelse.

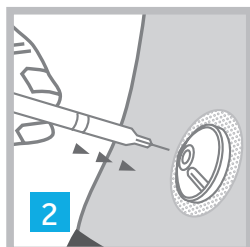

Penetrer membranen med kanyle.

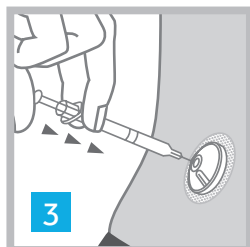


Injicér insulinen langsomt.

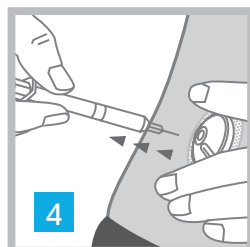


Træk injektionsnålen ud.

### FJERN

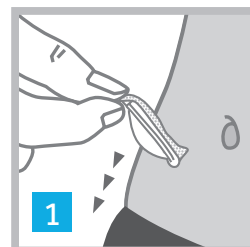


Grib fat i kanten af plasteret og fjern i-Port fra huden.

### i-Port™ Advance

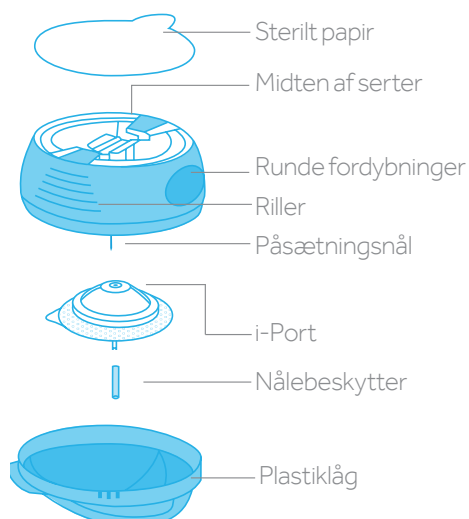

### Indstiksteder

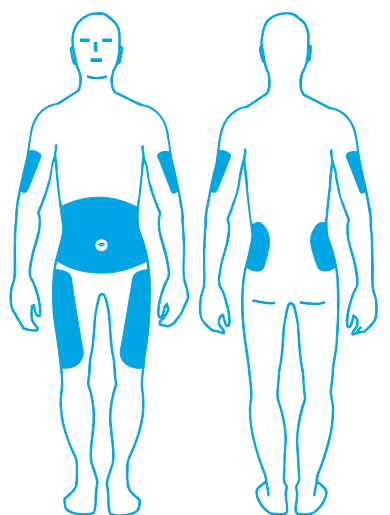

Dette er supplerende oplysninger til din brugervejledning. Læs venligst brugervejledningen for yderligere information.

## INFORMATION

- Brug af i-Port Advance™ kan ske både med kanyler og insulinpenne i størrelsen mellem 5mm-8mm og max 28 gauge.
- i-Port Advance™ kan bruges til både hurtig- og langtidsvirkende insulin. Den hurtigvirkende insulin skal injiceres først og efter 60 minutter kan den langtidsvirkende insulin injiceres.
- i-Port Advance™ skal skiftes hver 3. dag eller efter 75 injektioner. Skift altid indstiksted.

For en liste over indikationer, kontraindikationer, forholdsregler, advarsler og potentielle bivirkninger, henvises til indlægssedlen.

## Medtronic

**Danmark**  
Medtronic Danmark A/S  
Arne Jacobsens Allé 17  
2300 København S

www.medtronic-diabetes.dk  
Tlf: +45 32481800  
Fax: +45 32481801

[www.medtronic.dk](http://www.medtronic.dk)

Fremstillet hos Unomedical