



50 TIMERS BESKYTTELSE

OPLEV VERDEN - DIN INSULIN ER BESKYTTET

Tillykke med din SUGRBAG® COOL MED køletaske.

Denne instruktion er kun vejledende. På grund af det varierende klima og miljømæssige forhold, vil SUGRBAG® COOL MED tasken reagere forskelligt alt afhængig af vejr-mæssige forhold. Hvis SUGRBAG® COOL MED aktiveres og bruges efter vejledningen, vil den kunne dække dit behov i lang tid. Så længe den indre poses størrelse er udvidet, fungerer tasken fint, ellers skal inderposen aktiveres igen.

Aktiveringsvejledning

1. Fordel krystallerne jævnt i posen.
2. Læg den indre pose i blød i koldt vand.
3. Første gang skal den være i vandet i 5-8 minutter. Ved kontinuerligt brug skal den de efterfølgende gange være i vandet 3-4 minutter. **OBS: aldrig mere end 10 minutter**
4. Den aktiverede pose skal forblive bøjelig/smidig.
5. Tør den indre pose med et håndklæde før du putter din medicin i.
6. Herefter placeres den indre pose i yderposen.

Bemærk venligst:

- SUGRBAG® COOL MED indvendig pose skal lægges i blød i koldt vand igen, når inderposen begynder at blive mindre og varmere.

Det er vigtigt at den korrekte iblødsætningstid følges som anvist herover, da posen ellers kan blive for stor til brug. Hvis dette sker, skal inderposen tørres naturligt.

- SUGRBAG® COOL MED indvendig pose skal have luft. Den virker ved fordampning og skal derfor være i kontakt med luft. Den ydre pung tillader at fordampningen sker, og stabilisere posens temperatur. Det anbefales at SUGRBAG opbevares i håndbagagen eller i en lomme.
- OBS: Der kan være overskudsfarve første gang du tørrer inderposen med et håndklæde.
- SUGRBAG® COOL MED kan placeres i køleskab, men IKKE i fryser.

OPBEVAR IKKE SUGRBAG® COOL MED I EN LUFTTÆT ELLER VANDTÆT BEHOLDER NÅR DEN ER AKTIVERET.

Opbevaringsvejledning

Når SUGRBAG® COOL MED ikke er i brug, fjernes inderposen fra yderposen og lad inderposen tørre naturligt indtil gelen bliver til krystalform igen. For at holde krystallerne adskilt, ryst posen en gang imellem mens den er i gang med at tørre. Når den er helt tør, skal din SUGRBAG® COOL MED opbevares tørt, indtil den skal bruges igen. Tørretiden kan tage 2-4 uger afhængig af luftfugtigheden i omgivelserne.

For at fremskynde tørretiden kan forskellige metoder anvendes:

1. Læg den indre pose i nærheden af en varmekilde.
2. Hæng den indre pose på en tøjssnor, hvis vejret er velegnet.
3. Lad den indre pose ligge på en solrig plads i vinduet.

Put **IKKE** SUGRBAG® COOL MED i en tørretumbler!

Rengøringsvejledning

Yderposen af SUGRBAG® COOL MED kan vaskes i varmt vand med et meget mildt rengøringsmiddel. Du kan herefter skylle yderposen under rindende vand.

Den indvendige pose kan børstes forsigtigt med en blød børste. Børsten kan evt. dyppes i lidt sæbevand og påføres inderposen. Alternativt kan du bruge en ikke-blegende anti-bakteriel rengøringspray eller babyrenservesietter til at rense din inderpose.

PUT IKKE SUGRBAG® COOL MED I EN VASKEMASKINE!



Mitliv.dk by ReaMed

Vilhølsborgvej 16 | DK-7700 Thisted

Tlf. (+45) 97 93 46 00

www.mitliv.dk