

Sådan bruger du Eureka Varitex Off - strømpepåtager

Hjælp til påtagning af kompressionsstrømper



1) Fold Eureka dobbelt og stik plastikpinden igennem hullet



2) Stop pinden godt ind i lommen nederst på strømpepåtageren. Eureka er nu klar til brug



3) Skub Eureka over foden med pind-siden. (Træk ikke for hårdt)



4) Træk kompressionsstrømpen på som en støvle.



5) Sørg for, at hælen sidder rigtigt og fordel strømpen over hele fodens længde.



6) Træk pinden fra bagsiden af benet ud af Eureka



7) Træk i lappen på forsiden af Eureka



8) Træk Eureka ud af strømpen



9) Træk strømpen højere op ad benet



10) Glat evt. strømpefolderen ud. Dine strømper skulle nu sidde perfekt.